

MADE IN
EUROPE



Vores produkter og
råvarer er produceret
i Europa.

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.


(DK) Brugervejledning

22_20250106_DK

Dress Master - Leg

Pat. BA 2022 00046

Gebrauchsmusters Nr. 20 2023 105 598

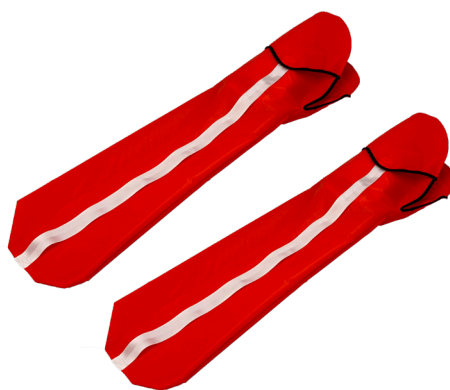

REF (Varenr.)

MC 001-0995

HMI nr.

133644

Navn - Størrelse

Dress Master - Leg

UDI-DI/GTIN

05744001974100

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 03 03 20

The Original Nordic
Human Handling Concept



Developed &
Manufactured by:



master-care.dk

Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet er et færdigsyet gliderør til brug ved påklædning. Dobbeltgliddet minimerer risikoen for shearskader hos bruger og minimerer den ergonomiske belastning hos hjælper i forbindelse med påklædning.

Anvendelse af produktet:

Produktet påføres det ene eller begge ben/arm(-e), hvorefter tøjet glides udover Dress Master - Leg. Når tøjet er på, kan Dress Master - Leg fjernes ved at trække i de påsyede stropper.

Indikation:

Kan benyttes hvor påklædning er vanskeligt grundet fx tonusforændringer, ændret sensorisk input, ergonomiske udfordringer mm.

Kontraindikation:

Bør ikke bruges direkte på åbne sår. Sår bør forbindes, inden påklædning påbegyndes.

Advarsel:

Efterlad ikke produktet på gulvet, da dette kan medføre fald.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at påklædningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Produktion og levetid:

Produktets produktionsdato kan ses på produktets label under "LOT" og vises som ÅÅMMDD - fx 251020, som refererer til, at produktet er produceret d. 20. september 2025.

Produktet forventes at have en levetid på 1-3 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes.

Kontrol/Eftersyn:

Produkter bør efterses jævnligt. Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssigt forsvarlig forflytning for både hjælper og bruger, bør kasseres. Produkter bør jævnligt efterses, og hvis defekte syninger eller brudte overflader findes, bør produktet kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Dress Master - Leg

Brug af Dress Master - Leg:



1. Placer evt. et stort stykke glidemateriale under brugerens ben og hofte for at minimere friktionen mod underlaget.



2. Placer Dress Master - Leg, så den korte side er ved skridt og den lange side udad. Trækstropperne placeres på ydersiden.



3. Før Dress Master - Leg ind over foden og glid den op langs benet. Sørg for, at der er glidemateriale inde under brugerens balle.



4. Hvis bruger ikke selv kan bruge det andet ben, påføres Dress Master - Leg på begge ben.



5. Før bukserne ud over de 2 Dress Masters - Leg og træk dem helt op under brugerens bækken/bagdel.



6. Tjek, at bukserne er helt oppe bagpå og udrettet. Luk bukserne.



7. Fjern Dress Master - Leg én af gangen, ved at trække samtidig i den forreste og den bagerste trækstrop.



8. Når begge Dress Master - Leg er fjernet, fjernes det underliggende glidemateriale.



9. Dress Master - Leg kan også bruges til påklædning af overkrop.

Brugervejledning - Dress Master - Leg

Tekniske specifikationer

ISO klassificering:

ISO 12952-1:2015

Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs antændelighed

- Del 1: glødende cigaret.

REF - Navn	Størrelse:	Max. brugervægt:	Produktindhold:	Pakke vægt:
001-0995 Dress Master - Leg	L 150 x B 37/29 cm	150 kg	16% Polyester, 76% Polyamide, 8% Silikone.	0,15 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg altid for, at brugeren ikke hænger fast i stropperne.



Sørg for, at alle relevante bremses er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Genbrug efter rengøring:

Hvis produktet er blevet rengjort i henhold til anvisningerne, kan det bruges af andre brugere.



Vask:

Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine ved max. 85 °C. Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



Tørretumbling:

Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C. Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Strygning:

Tåler ikke strygning.



Kemisk rensning:

Tåler ikke rensning.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der ikke er skader på stof, stropper, sømme mm. Har produktet høj friktion eller på anden vis er i stykker, skal produktet kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

Find os på:

