

MADE IN EUROPE



Vores produkter og
råvarer er produceret
i Europa.

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

44_20260408_DK

Giwik – Knee Pad



REF (Varenr.)
GW2004

HMI nr.
139264

Navn
Giwik - Knee Pad

UDI-DI/GTIN
05744001974759

Størrelse
Længde 16 cm,
Udvendig diameter 61 cm
Indvendig diameter 43 cm

The Original Nordic
Human Handling Concept



Scan Me

Developed &
Manufactured by:



Brugervejledning - Giwik - Knee Pad

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet / produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde.

Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet har til formål at yde trykafledning på tryktruede kropsdele eller til aflastning af led for at mindske risiko for smerter.

Indikation:

Kan benyttes, hvis bruger oplever smerte eller ubehag under lejring fx i sideleje eller er tryktruet ved knæets knoglefremspring.

Kontraindikation:

Det anbefales at åbne sår forbindes inden brug af den trykafledende pude. Ellers kendes ingen kontraindikationer ved brug af produktet.

Indhold:

Stof: 90% Bomuld, 10% Polyester

Skum: 100% Polyethylen.

Elastik: 48% Polyester, 52% Naturgummi.

Risikovurdering:

Hvis bruger er tryktruet eller har tryksår bør brug af produktet ikke stå alene men være i sammenspil med sundhedsfaglig vurdering og behandling.

Kendskab til produktet/forflytning:

Produktet kan bruges både som smertebehandling og/eller -forbyggelse samt til brugere, som er i risiko for tryksår. Hvis brugeren oplever, at produktet ikke i tilstrækkelig grad reducerer trykket mod huden, bør der søges en sundhedsfaglig vurdering.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 1-3 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes og tørres.

Kontroller, at der er tilstrækkelig fleksibilitet i skummet, når det trykkes sammen og at alle syninger er intakte. Hvis ikke eller hvis produktet i øvrigt er i stykker, skal det kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.

ADVARSLER



Vi anbefaler, at behandling af tryksår sker i samarbejde med sundhedsfagligt personale. Hvis trykmærker ikke forsvinder ved brug af produktet, bør der ligeledes søges sundhedsfaglig hjælp.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Medicinsk udstyr, lever op til Regulatorivet for medicinsk udstyr MDR 2017/745.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk



Brugervægt:

Ingen max brugervægt.



Vask:

Dette produkt kan vaskes i hånden ved max. 60 °C.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel.



Tørretumbling:

Dette produkt må IKKE tørres i tørretumbler.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Strygning:

Tåler ikke strygning



Kemisk rengøring:

Tåler ikke rengøring.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at skummet giver er fleksibelt ved tryk og at stof og skum er intakt. Hvis ikke eller hvis produktet er i stykker, skal det kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

Find os på: